

Activa Brugervejledning



Alum Bergen™

Pro-Comfort - Broholmvej 9 - 5463 Harndrup
Tlf: 70 23 50 10 - Fax: 70 23 50 12 - E-mail: info@procomfort.dk

Indholdsfortegnelse

1. Indledning/formål
2. Kørestolens dele
3. Kørestolens mekaniske funktioner og indstilling
 - Sædeenheden
 - Ryggen
 - Skubbegreb
 - Armlæn
 - Sædet
 - Benstøtter
 - Midterophængte benstøtter
 - Sideophængte benstøtter
 - Hjul
 - Antitip
 - Bremse
 - Transport
4. Ibrugtagning af kørestolen
5. Vedligehold af kørestolen
 - Daglig vedligehold
 - Rengøring
 - Kvartalsvis vedligehold
 - Halvårlig/årlig vedligehold
6. Målskema

Såfremt eventuelle brugsvejledninger til moduler, tilbehør og/eller specialfremstillet udstyr er tilknyttet denne vejledning vil disse erstatte tilsvarende afsnit i standardbrugsvejledningen.

Garanti samt ID

Garanti i henhold til købeloven. Fabrikations- og materialefejl, der er opstået ved normal brug af kørestolen, udbedres af Pro-Comfort uden beregning, af fabrik.

Garantien dækker ikke fejl og skader, som er opstået på grund af fejlbrug eller slidtage. Garantien dækker heller ikke, hvis uoriginale dele er anvendt eller monteret på kørestolen. Købsdato skal dokumenteres af kunde ved faktura, der fungerer som garantibevis.

ID/købsdato

Kørestolens ordrenummer: _____ Kørestolens

stelnummer: _____

Evt. prøveperiode fra: _____ til: _____

Købsdato: (Jævnfør fakturadato) _____

1. Indledning/formål

Activa er en allround fastramme kørestol, som er beregnet til inden- og begrænset udendørs brug.

Denne brugsvejledning indeholder vigtige oplysninger om anvendelse, vedligeholdelse og sikkerhed ved brug af kørestolen. Det er derfor vigtigt, at brugsvejledningen gennemlæses, inden kørestolen tages i brug, så De får kendskab til netop Activa's muligheder.

Vi arbejder for at leve op til den tillid, De har vist ved at vælge et Illum-Bergen produkt. Vi vil være meget taknemmelige for ideer eller kritik, både positiv og negativ, da dette vil danne grundlag for den stadige produktudvikling.

Deres erfaringer med kørestolen, vil således kunne komme fremtidige brugere tilgode.

De er ligeledes meget velkommen til at henvende Dem, hvis De har spørgsmål eller eventuelle problemer med Deres allround kørestol.

Vi håber, De får meget fornøjelse af Deres Activa.

Med venlig hilsen

Pro Comfort
Broholmvej 9
DK-5463 Harndrup
Tel.: +45 70 23 50 10
Fax: +45 70 23 50 12
E-mail: info@procomfort.dk
www.procomfort.dk

Illum Bergen™



CE



Dette advarselssymbol er brugt ved de afsnit i brugsvejledningen, som De bedes give særlig opmærksomhed.



Stolen kan leveres med betjeningsgreb (bremse, rygindstilling og benstøtte) monteret i højre eller venstre side, alt efter behov.

3. Kørestolens mekaniske funktioner og indstilling

I det følgende gennemgås, hvorledes stolens mekaniske funktioner fungerer og, hvorledes kørestolen indstilles til den enkelte bruger.




Vi gør opmærksom på, at individuel grundtilpasning/indstilling altid bør udføres af en kvalificeret person (for eksempel terapeut, tekniker eller konsulent fra Pro-Comfort).

Sædeenheden

Ryggen

Ryggen har en stropryg. Når rygslaget løsnes og trækkes opad, kan man se stropryggen. Stropperne kan reguleres i bredden, således at den optimale rygstøtte opnås. Stropryggen bør tilpasses af en fagperson, mens brugeren sidder i kørestolen. Rygslaget slås ned igen inden brug af kørestolen.

Ryggens position kan desuden reguleres trinløst -4 grader fremad og 20 grader tilbage, ved hjælp af det lille betjeningsgreb, der er placeret under højre eller venstre armlæn. Man skal sidde med ryggen op mod ryglænet for at udnytte denne funktion. Tryk på betjeningsgrebet for rygvinkel, og pres samtidig overkroppen bagover. Når den ønskede

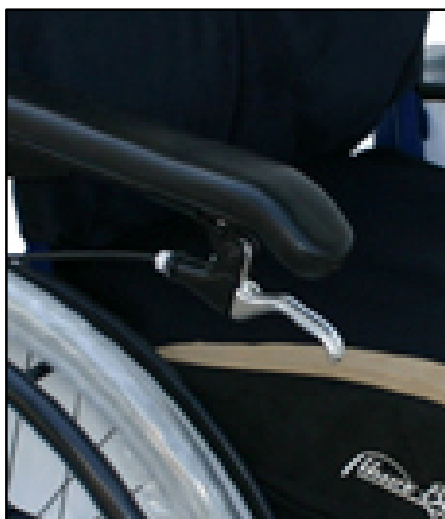

position er opnået, slippes håndtaget.

For at få ryggen tilbage i oprejst position, skal man igen presse betjeningsgrebet i bund. Let tryk mod ryglænet, og ryglænet vil automatisk søge op mod lodret position.

En stol med fremadfældet ryg er ideel til at gå stolen fremad, idet man sidder i en aktiv

stilling. En stol med tilbagelænet ryg er ideel for hvilestilling, idet man sidder i en passiv stilling. Endvidere kan selve ryghøjden indstilles, ved hjælp af umbrakoskruerne på rygrygere inde under rygbeklædningen.

Skubbegreb



På ryggen er der monteret 2 stk. skubbegreb. Skubbegrebene kan justeres i højden, ved hjælp af fingerskruer, placeret på skubbegrebene nede under bøjljen.

Armlæn

Armlænet kan justeres i højden ved hjælp af fingerskruen, som sidder bag ved armlænet på stellet.

Vinklen på armlænet kan justeres.

Armlænet fældes bagover og inde i armlænsbeslaget er en unbrachoskrue. Unbrachoskruen skrues udad for positiv vinkling og indad for negativ vinkling.



Bemærk at armlænskruen skal være placeret korrekt udfor den aktuelle rille. Ellers bliver armlænet ikke monteret korrekt og sikkert. Når armlænet har været justeret i højden, er det vigtigt at sikre, at fingerskruen spændes ordentligt.

Sædet



Sædet består af et plansæde i træ, opbygget af gummigjorder for at aflaste sædeknogler og haleben.

Plansædet kan indstilles i 3 forskellige positioner, helt vandret, positivt kip (+ 3 grader) og negativt kip (-2 grader). Dette er indstillet efter aftale ved levering, og hvis indstillingen ønskes ændret skal det udføres af teknisk personel, ved hjælp af værktøj.

Udover dette kan sædedybden justeres i 3 forskellige dybder, sædedybden vil også være indstillet korrekt i.h.t aftale, før levering og hvis indstillingen ønskes ændret, skal det udføres af teknisk personel, ved hjælp af medfølgende værktøj.

Sædepuden

Sædepuden er i koldskum og har et aftageligt betræk. Sædepuden sidder fast på plansædet med velcro.

Sørg for, at puden tages ud af stolen og luftes, når stolen ikke bruges. Dette øger holdbarheden af puden. Kontroller jævnligt og mindst én gang årligt om sædepuden er siddet flad. En pude uden bæreevne øger risikoen for siddesår.

Hvis bruger har problemer med inkontinens kan der anskaffes inkontinensbetræk som tilbehør.

Benstøtter og fodplader

Kørestolen har påmonteret enten midterophængte eller sideophængte benstøtter.

Midterophængte benstøtter

Benstøtteophænget består af et benstøtte-

ophæng, centralt ophængt under plansædet. Fodpladerne og nedre benstøtter er ophængt



Længdereguleringsskrue

Vinkeljusteringsskrue

i benstøtteophænget og længden på benstøtten reguleres v.h.a. en fingerskrue. Fodpladernes vinkel reguleres ved at skru skruen ud eller indad.

Vinklen på benstøtten reguleres i håndtaget,



Håndtag for regulering af benstøttens vinkel



Vinklen på benstøtten, skal reguleres uden belastning på fodpladerne.

som sidder ud for plansædet i højre eller venstre side. Evt. problemer med at fodpladen går mod gulv kan skyldes at vinklen på fodpladen er for lodret. Brug da betjeningsgrebet ved plansædet og før benstøtten længere frem. Det kan også skyldes, at fodpladernes vinkel er for negativ eller at benstøtten er justeret for langt ned.



Sideophængte benstøtter

Benstøtten har 4 justeringsmuligheder:
Vinkeljustering for henholdsvis knæet og fodens vinkel, længdejustering i.h.t lårets længde, samt højdejustering i.h.t. underbenets længde.

Hjul

Stolen er monteret med højtryksdæk (8 bar).
Kontroller jævnligt at dækkene er luftfyldte, da dette er en forudsætning for letkørthed og at bremserne virker optimalt.

Skal stolen bruges med kun en fodstøtte, vippes den ikke ønskede fodplade op. Benstøtten trækkes op under stolen v.h.a. betjeningsgrebet, sørg for at fodplader er foldet ned.

Tryk på udløserknop og før håndtaget fremad indtil, håndtaget ikke kan komme længere frem. Slip udløserknappen. Benstøtten hænger nu oppe under plansædet og fodpladerne er automatisk foldet op under stolen ved denne bevægelse. Hvis betjeningsgrebet for benstøtten sidder i vejen for forflytninger eller ved kørsel, kan armen trækkes tilbage ved hjælp af ganther-grebet på betjeningsgrebet.



Snaplås for Quick Release

Drivhjulene har 3 placeringsmuligheder, alt efter behov for afbalancering af kørestolen. Drivhjulene leveres som standard med Quick Release, hvor drivhjulene let aftages ved tryk på snaplåsen.



Ved montering af drivhjulet, skal det sikres at drivhjulene er sat korrekt i.

Svinghjulene er ophængt i en forgaffel, der ligeledes har indstillingsmuligheder alt efter, hvilket forhjul der er valgt.



Vær opmærksom, at stellet altid er i vandret position, hvis stellet f.eks. hælder fremover, går det ud over køreegenskaberne i stolen.



Udløserknop

Ganthergreb

Antitip



Antitip

Fingerskrue for højdejustering

Kørestolen er forsynet med et sæt antitip, der sikrer at stolen ikke kan vælte når stolen står i hvileposition.

Ydermere sikrer antitippene at stolen ikke vælter ved forcering af mindre forhindringer, for eksempel ruller antitippene hen over dørttrin. Antitippene justeres i højden ved hjælp af fingerskrue (justeres til 15mm over gulv).



Bemærk at antitip-fingerskruen skal være placeret korrekt udfor den aktuelle rille. Ellers bliver antitip ikke monteret korrekt og sikkert. Husk efterspænd fingerskruen.

Skal kørestolen føres over en større forhindring, hvor antitippen vil være en hindring, kan den bevægelige del af antitippen vippe op. Husk at vippe denne del af antitippen tilbage igen, efter forhindringen er forceret.



Antitippene må ikke fjernes.

Bremse

Kørestolen er forsynet med et sæt håndbrems. Når bremsehåndtaget, føres nedad vil

bremses kørestolen, og når bremsen skal løsnes føres bremsearmen opad.



Bremsehåndtag



Husk altid at bremse stolen når den holder stille.

Transport

Hjul kan afmonteres ved hjælp af Quick Release funktionen på drivhjulene.

Skubbegrebene indstilles i laveste højde. Hvis stolen er monteret med midterophængte benstøtter, kan det være en fordel at klappe benstøtten op under stolen.

Hvis stolen skal løftes under transport, så løft aldrig i benstøtte, armlæn eller skubbegreb, men løft i selv stellet.

4. Ibrugtagning af kørestolen



Det er vigtigt at brugeren og eventuel hjælper har sat sig ind i kørestolens funktioner inden ibrugtagning.

- Når De sætter Dem i kørestolen, eller bliver forflyttet over i den, skal stolen være bremset. Det samme gør sig gældende når kørestolen forlades.
- Man skal desuden sikre sig at antitip er monteret korrekt.

5. Vedligehold af kørestolen



Vedligeholdelse af kørestolen er en vigtig faktor. God vedligeholdelse sikrer, at De altid har en kørestol, der er i orden brugs-mæssigt og sikkerhedsmæssigt, ligesom levetiden på kørestolen øges.

For overskuelighedens skyld har vi delt vedligeholdelsen op i daglig, kvartalsvis og halvårlig/årlig vedligehold.

Daglig vedligehold

Dagligt eller jævnligt tørres kørestolens metaldele af med en fugtig klud, opvredet i almindelig sæbevand.

Alle slidflader på kørestolen, er monteret med betræk, som har påsyede velcrobånd eller lynlås, d.v.s. at de kan tages af og vaskes. I hvert enkel del er der påsyet et mærke med vaskeanvisning.

Det øvrige stof kan støvsuges og pletter kan fjernes med polsterrens.

Sædepuden bør hver nat tages af kørestolen og stå til luftning. Dette sikrer en længere levetid for puden.

Fingerskruer for armlæn, benstøtter og antitip efterspændes.

Kvartalsvis vedligehold

Kørestolens mekaniske dele bør gennemgås. Løse skruer stammes og kørestolen smøres i bevægelige dele.

Forhjul/baghjul renses for skidt omkring nav.

Halvårlig/årlig vedligehold

Kørestolens mekaniske funktioner gennemgås af kvalificeret person. Stolen efterspændes og smøres. Dæk checkes for slidtage.

Polstring checkes, vær specielt opmærksom på sædepuden, som kan være „siddet flad“.




6. Målskema

Målskema

- Målt i mm hvis ikke andet er angivet
- Tolerance på ± 10 mm og $\pm 1^\circ$

		Small	Medium	Large	X-Large
A	Sædebredde	400	450	500	550*
B	Sædehøjde excl. pude	22" hjul ~ 390			
C	Sædedybde	3 indst. på hhv. 415, 440 og 465 m. værktøj			
D	Ryghøjde ekskl. pude	450 ▶ 580 /trinløs m. værktøj			
E	Armlæns højde fra plansæde	245 ▶ 350 /indst. med 7,5 mm interval			
F	Bredde mellem armlæn	400	450	500	550
G	Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr.	300 ▶ 435 m. 7.5 mm interval			
H	Kørehåndtagshøjde	22" hjul ~ 870 ▶ 1180 /trinløs			
I	Total højde /klar til brug	22" hjul ~ 850			
J	Total bredde /klar til brug	600	650	700	750
K	Total længde ekskl./inkl. benstøtter	680/910			
L	Ryg vinkel	-4° ▶ +20° /trinløs			
M	Sædevinkel	3 indst. på hhv. -2°, 0° og +3° m. værktøj			
N	Benstøttevinkel	85° ▶ 143° /trinløs			
P	Fodpladevinkel	+81° ▶ +99°			
	Transportvægt/u. løse dele	26 kg	27 kg	28 kg	29 kg
	Brugervægt - standardudgave	Max: 120kg.			

* kan leveres med en sædebredde fra 510 til 700mm

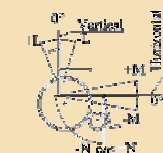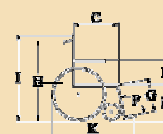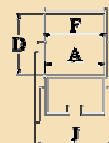



Tlf: 70235010

Mail: info@procomfort.dk